



Gebrauchs- und Pflegeanleitung Posturedo®

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen TOGU Posturedo®.

Mit einem TOGU® Produkt haben Sie sich für ein Markenprodukt „made in Germany“ entschieden.

Als Sportgerät ist es entsprechend den geltenden EU Regelungen produziert und enthält keine verbotenen Phthalate und keine Schwermetalle.

Das neue Therapiegerät zur Unterstützung bei Haltungsregulation und -stimulation, Koordinations- und Kraftverbesserung. Stabilisieren und mobilisieren. Er ermöglicht durch die neuartige Verbindung aus einer hochwertigen Holzplatte und einem dynamischen Luftkissen vielfältige Übungsvarianten mit instabilem Untergrund.

Die besondere Art der Instabilität, die durch die Lagerung auf Luft erreicht wird, wirkt durch Übertragung kleinster Bewegungen auf den Körper und ruft entsprechende Ausgleichsbewegungen und Stabilisation hervor. Als optische Kontrolle für den Therapeuten dient ein integrierter Lageindikator.

Der Grad der Instabilität kann mit der beiliegenden Pumpe einfach und schnell stufenlos an jedes Fitnesslevel angepasst werden. Die großzügig bemessene Platte aus Holz ermöglicht alle Positionen und Körperlagen auf dem Posturedo einzunehmen.

Ideal für alle Trainings- und Therapiezentren.

Kleine Gerätekunde:

Der Posturedo ist aus hochwertigem Ruten (luftgefüllter Teil) und einer mehrfach verleimten Platte aus Birkenholz mit Edelholzfurnier hergestellt. Das Ballkissen ist mit einem Nadelventil versehen. Mit den, an der Seite vorhandenen, Schraubvorrichtung kann die Höhe, zusätzlich noch um einige Zentimeter an den gewünschten Schwierigkeitsgrad des Benutzers, angepasst werden. Je länger die Schraubvorrichtung nach unten gedreht wird, desto einfacher sind Übungen durchzuführen.

Posturedo

Maße: ca. 67 x 72 x 13 cm

Gewicht: ca. 9.500 g

Belastbarkeit: ca. 200 kg

Temperatur-Beständigkeit:

Das Gerät soll idealerweise bei Raumtemperatur eingesetzt werden.

Pflege:

Zum Reinigen des Ballkissens können Sie alle milden, handelsüblichen Reinigungs- sowie Desinfektionsmittel verwenden. Lösungsmittelhaltige, säurehaltige oder ätzende Reiniger greifen das Material an. Die Holzplatte sollte mit handelsüblichen Holzreinigungsmitteln gereinigt werden, und entsprechend trocken gelagert werden.

Nachpumpen:

Zum Nachpumpen bzw. Einstellen des Ballkissens verwenden Sie bitte die Original TOGU Ballpumpe für Nadelventile (Art.nr. 904400), erhältlich im Handel.

Beachten Sie beim Nachpumpen, dass die Höhe des Ballkissens **in keinem Fall** mehr als 13 cm beträgt, da sich das Kissen sonst dauerhaft verformt.

